

アキュデントシステム1 (コンプリートデンチャー用)



System I™
Complete Dentures


完璧を求めて もっとも細部の再現性へ

アキュデントシステム1

臨床医の先生の意見を参考に、今までの印象精度を高め、仕事を簡素化するシステムです。
デンチャーの症例において高品質で精密な印象を採得するために、解剖学的に設計されたトレーの形状と口腔内で機能するように考えられた印象材の粘稠度との調和によってすばらしい印象採得が可能になりました。






一般的なトレーと違ってトレー外形が印象表面に影響を及ぼさず簡単に印象採得が出来ます。
トレーと2種類の印象材が安静時の辺縁状態の印象を正確に採得します。

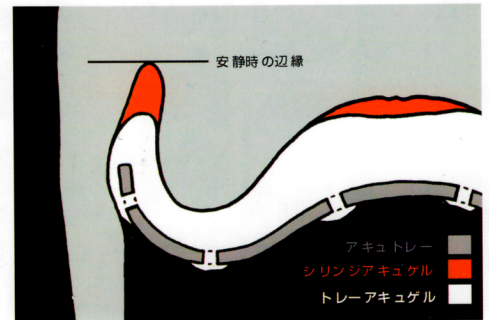

アキュデントシステム1 コンプリートデンチャー

アキュデントシステム1で印象採得すると、解剖学的に見て精密な模型を製作することが可能です。個人トレーを製作しなくても、粘膜の硬組織・軟組織の印象採得が簡単に行えます。

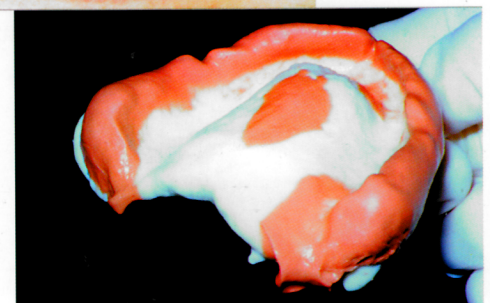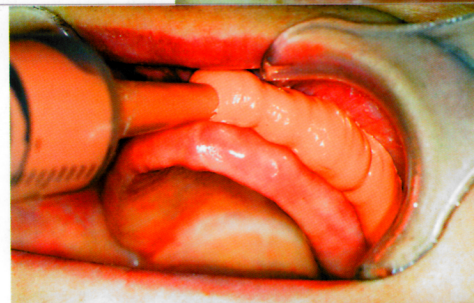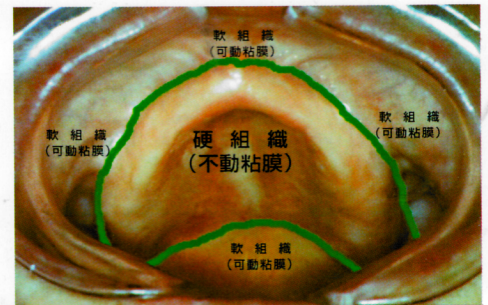

アキュトレースシステム1

独特のコンセプトで設計されたトレーは難症例のケースでも修正や調整が簡単です。
一般的なトレーと違ってトレー外形が印象表面に影響を及ぼさず簡単に印象採得が出来ます。
オートクレープ可能な樹脂性です。


上顎アキュトレーの特徴

一般的なトレーと違って、口腔前庭部や周囲組織に影響を及ぼすトレーの辺縁部が極端に短く、シリンジアキュゲルとトレーアキュゲル印象材の調和により、正確な印象採得が可能になります。

下顎アキュトレーの特徴

無歯顎下顎印象で最も重要視されている臼後三角の印象採得に理想的な2種類のトレー形状があります。
顎堤の吸収に対応しているトレーの形態をしています。
長い舌側辺縁部を持ち顎舌骨筋線部の印象を明確に採得出来ます。

上顎アキュトレー
トレーは辺縁が短
くなっている

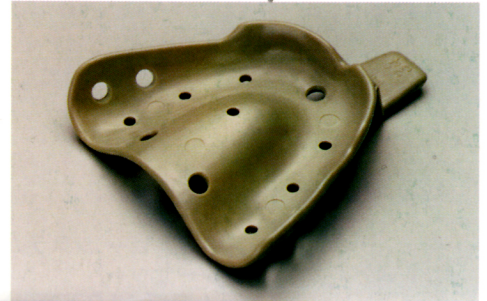


下顎アキュトレー
顎堤の吸収が大き
く臼後三角が急激
に下がっている
トレーの形態

アキュデントシステム1

シリンジアキュゲル

ライトボディ型シリンジアキュゲル（オレンジ色）は、印象採得に必要な部位にシリンジで流し込める流動性の高い材料です。

口腔前庭部や舌側前庭部に印象材を注入後、トレーアキュゲルで全体の印象を採得後すばやく流動性がなくなるので理想的な辺縁の印象採得が可能です。

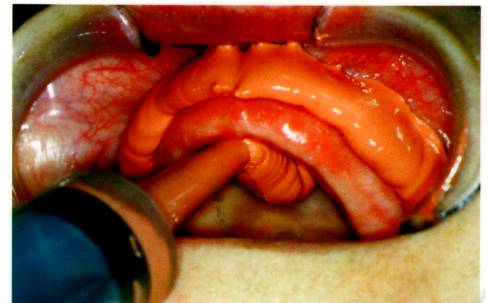


アキュデントシステム1

トレーアキュゲル

ヘビーボディ型トレーアキュゲル（白色）は口腔内でシリンジアキュゲルのサポートをします。この印象材は歯槽堤や口蓋部の圧痛点を無くすことのできる材料で、患者さんの口腔内で個人トレーの代わりになります。

正確な混水比にすることにより『ゼロフロート』になり、嘔吐反射の強い患者さんにも喉に垂れ落ちず正確な印象採得が出来ます。

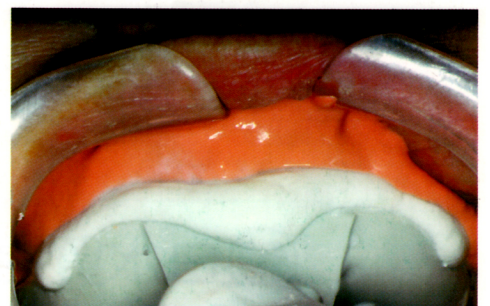

アキュデントシステム1

(コンプリートデンチャー)

アキュデントシステム1

各製品内容

- 15ヶ アキュトレ システム1
トレーセット
(5上顎用、10下顎用)
- 1箱 アキュデントシステム1
シリンジアキュゲル (24袋)
- 1箱 アキュデントシステム1
トレーアキュゲル (24袋)
- 1本 アキュデント 35ccシリンジ
- 1ヶ アキュデント フィンガーグリップ
- 1ヶ アキュデント 計量用カップ
- 1ヶ アキュデント 温度計
- 1ヶ アキュデント トレーキャリパー
(測径器)
- 1ヶ アキュデント トレーホルダー



医療機器許可番号27BY0101



パーシャルデンチャーには、
アキュデントシステム2で
対応出来ます。

HAKUSUI

information

2005年5月

印象採得システム アクデントシステム



アクデントシステム1
(フルデンチャー用)

アキュトレー システム1

アキュトレー システム1 トレーセット (15個)
標準価格 ¥53,000

上顎トレー (#30,31,32,33,34)

下顎トレー (#20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)

各トレー ¥4,800

アクデントシステム1 シリンジアキュゲル (24袋) ¥5,400

アクデントシステム1 トレーアキュゲル (24袋) ¥8,000

アクデント 35ccシリンジ (1本) ¥800

アクデント フィンガーグリップ (1枚) ¥500

アクデント 計量用カップ ¥500

アクデント 温度計 ¥800

アクデント トレーキャリパー ¥1,500

アクデント トレーホルダー ¥6,000



アクデントシステム2
(パーシャルデンチャー用)

医療機器許可番号27BY0101

アキュトレー システム2

アキュトレー システム2 トレーセット (12個)
標準価格 ¥48,000

上顎トレー (#1,2,3,4,5,6)

下顎トレー (#7,8,9,10,11,12)

各トレー ¥4,800

アクデントシステム2 シリンジアキュゲル (18袋) ¥5,000

アクデントシステム2 トレーアキュゲル (18袋) ¥7,800

アクデント 35ccシリンジ (2本) ¥800

アクデント フィンガーグリップ (1枚) ¥500

アクデント 計量用カップ ¥500

アクデント 温度計 ¥800

アクデント トレーホルダー ¥6,000

アクデントシステム2 プレシュアチップミディアム (白) ¥4,000

アクデントシステム2 プレシュアチップソフト (透明) ¥4,000

記載されている標準価格は税別です。

合計 ¥75,000 を



¥62,000

上記製品をご注文して頂くと
セット特別価格として

合計 ¥77,400 を



¥68,000


アキュデントシステム1

臨床医の先生の意見を参考に、今までの印象精度を高め、仕事を簡素化するシステムです。

デンチャーの症例において高品質で精密な印象を採得するために、解剖学的に設計されたトレーの形状と口腔内で機能するように考えられた印象材の粘稠度との調和によって、すばらしい印象採得が可能になりました。

トレーの特徴


安静位の辺縁状態で、シリンジアキュゲル(ライトボディ印象材)とトレーアキュゲル(ヘビーボディ印象材)を使用して印象採得するため、トレーによる極端な印象採得が無くなり、個人トレーを製作しなくても、粘膜の硬組織・軟組織の正確な印象採得が簡単にできます。

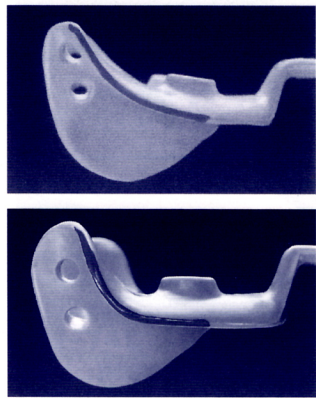

下顎アキュトレ


無歯顎下顎印象で最も重要視されている臼後三角付近の印象採得に理想的な2種類のトレー形状を持ち、顎堤の吸収に対応しているトレーの形態をしています。

長い舌側辺縁部を持ち顎舌骨筋線部の印象を明確に採得できます。

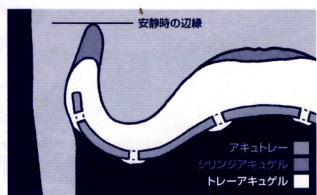

上顎アキュトレ

今までのトレーと違って、口腔前庭部や周囲組織に影響を及ぼすトレー辺縁部が極端に短く、トレーの影響による過剰な印象採得がありません。

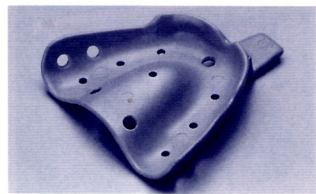


アキュデントシステム1 シリンジアキュゲル

このライトボディ型シリンジアキュゲル(オレンジ色)は、印象採得に必要な部位にシリンジで流し込める流動性の高い材料です。注入後はすぐに流動性がなくなり理想的な辺縁の印象採得が可能です。



アキュデントシステム1 トレーアキュゲル


ヘビーボディ型トレーアキュゲル(白色)は口腔内でシリンジアキュゲルのサポートをします。この印象材は歯槽堤や口蓋部の圧痛点を無くす事の出来る材料で、患者さんの口腔内で個人トレーの代わりになります。正確な湿水比にする事により『ゼロフロート』になり、嘔吐反射の強い患者さんにも喉に垂れ落ちず正確な印象採得が出来ます。

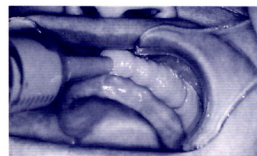

上下にシリンジアキュゲルをデンチャーボーダー部に注入します。



シリンジアキュゲル硬化前にトレーアキュゲルを口腔内に入れ連合印象します。

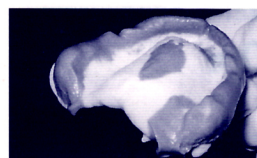


上顎印象採得された状態です。



下顎模型完成
顎舌骨筋線部の印象が特徴です。


アキュデントシステム2

システム2印象システムは有歯顎印象システム(パーシャルデンチャー)用として開発されました。今までの印象システムでは粘膜と歯牙を同時に採得することは困難でしたが、このシステムではトレーのパラースと印象材の精度により正確な印象採得が可能です。

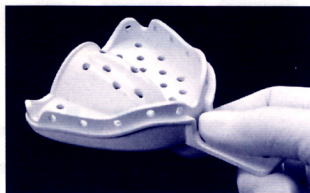

上顎トレー

歯牙と粘膜の印象採得に最適な解剖学的に設計された形態をしています。トレー全体にアンダーカットと印象の厚みをだすリッジがあり、トレー口蓋部は気泡をアラインに流す溝があります。この印象材とトレーの組み合わせによって解剖学的精密印象が採得できます。

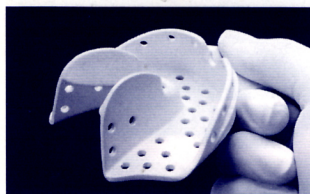

下顎トレー

短い頬側のトレーの形態は上顎同様トレーにリッジを持っています。形態は遠心に向かう事により短くなります。この形態により臼歯部(遊離端欠損)に対して歯牙と粘膜の印象採得が簡単に行えます。舌側部の形態は長く、歯牙印象採得に有利です。



アキュデントシステム2 トレーアキュゲル

ヘビーボディ型(淡緑色)の少し硬めのトレーアキュゲル印象材はトレー材の役割をする印象材です。別々の印象材を口腔内で一体化させるので機能的で精密な印象採得が可能になります。




アキュデントシステム2 シリンジアキュゲル


ライトボディ型(青色)のシリンジアキュゲルはシリンジを併用する事により気泡の無い印象採得が可能です。

アキュデントシステム2 プレシュアークリップ


シリンジアキュゲルをシリンジに入れ印象材を押して歯牙の印象採得をする為、気泡を巻き込まず歯牙周辺の印象精度が向上します。

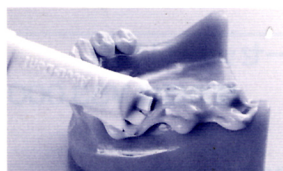

口腔内でトレーアキュゲルと一体化させます。歯牙と粘膜面のすばらしい印象が採得されます。

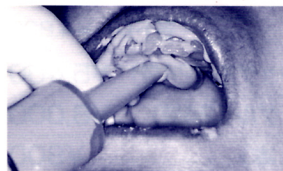

シリンジアキュゲルをプレシュアークリップを使って注入します。

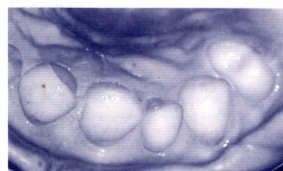

気泡のない歯牙の印象採得が出来ます。パーシャルケースの完成模型です。